

ÉCOUVILLONS POUR PRELEVEMENT VAGINAL

INSTRUCTIONS DE RECUEIL

En fonction des analyses à réaliser prélever les écouvillons suivants et les transmettre au laboratoire dans les délais indiqués

	Prélèvement	Délais d'acheminement et conditions de conservation
Bactériologie / mycologie standard	2 écouvillons avec milieu de transport (deltalab Tube with transport media)	24 heures à Température ambiante
Recherche de chlamydiae	1 écouvillon kit APTIMA (notice d'utilisation en bas du document)	
Recherche de mycoplasme	1 écouvillon eSwab dans son tube de conservation	
Recherche spécifique de streptocoque du groupe B	1 écouvillon avec milieu de transport (deltalab Tube with transport media)	

Réaliser le prélèvement de préférence avant toute toilette, désinfection ou prise d'antibiotique
 Identifier les écouvillons avec les nom et prénom et la date de naissance du patient.
 Remplir la fiche de renseignements ci-dessous.


Fiche de renseignements

Nom..... Prénom.....
 Nom de jeune fille..... Téléphone.....
 Adresse.....
 Date de naissance..... Sexe : M - F

Date et heure du prélèvement : le ___ / ___ à ___ H__ Nom du préleveur :

Antibiothérapie en cours et/ou durant les jours qui précèdent ? Oui - Non

Si oui, nom de l'antibiotique :

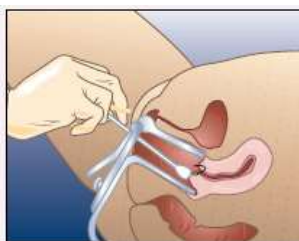

1. Retirer l'excès de mucus avec un écouvillon de nettoyage et le jeter.



2. Insérer l'écouvillon endocervical féminin dans la col de l'utérus et effectuer des rotations pendant 15 à 30 secondes.



3 Placer l'écouvillon dans le tube



4 Casser le manche au niveau de la ligne repère



5 Visser fermement le bouchon sur le tube.

Mettre dans le sac : cette fiche complétée / le prélèvement / l'ordonnance

Si le patient dépose le prélèvement au laboratoire, merci de lui demander de se munir de sa **carte vitale** ou au **moins l'attestation** de sécurité sociale ainsi que sa **carte de mutuelle** en cours de validité.