

LBM BIOPTeam BREtin

labm-bretin@wanadoo.fr
Tel : 04 74 22 52 09

LALANDE

lalande.secr@wanadoo.fr
Tel : 04 74 22 04 44

VONNAS

labo.vonnas@orange.fr
Tel : 04 74 50 17 89

Ordre des tubes : BLEU → JAUNE → VERT → VIOLET → GRIS (Pas de tube de purge y compris avec les Epijet)

SECTEUR CHIMIE IMMUNOLOGIE

acide urique, albumine, bilirubine totale et directe, calcium, CPK, créatinine, CRP, fer, ferritine, capacité de fixation de la sidérophiline, GGT, haptoglobine, Ig G, A, M, Iono, LDH, lipase, magnésium, myoglobine, phosphatase alcaline, phosphore, protéines totales, réserve alcaline, transaminases, transferrine, troponine, urée Hormones et vitamines : βHCG, T3 libre, T4 libre, TSH, Vitamine D Médicaments : amikacine, vancomycine, gentamicine	Vert	Héparine	1 tube
Bilan lipidique (EAL) : cholestérol, HDL, triglycérides, Apo A et B	Vert	Héparine	à jeun
acide lactique, ammoniémie, calcium ionisé, carboxyhémoglobine, méthémoglobine	Vert	Héparine	Acheminement immédiat à 4°
glucose	gris	fluorure	1 tube à jeun
électrophorèse des protéines et/ou immunofixation	2 Jaunes	SEC	2 tubes
BNP	Violet	EDTA	1 tube
NT-Pro B.N.P., Procalcitonine (PCT)	Vert	Héparine	1 tube
hémoglobine glyquée	Violet	EDTA	1 tube
Sérologie* : hépatite C, hépatite B (Ag HBs, Ac HBc et HBs), rubéole, toxo., HIV Marqueurs* : PSA totale et libre, AFP, ACE Protéines : Préalbumine Hormones : FSH, LH, oestradiol, progestérone Vitamines : folates, vitamine B12 sérique Médicaments : digoxine	Jaune	SEC	1 tube A jeun pour analyse folates Cortisol : préciser H de Pvt
Médicaments : lithium, acide valproïque (Dépakine)	Jaune	SEC	
Sérologie* : hépatite A, CMV	Jaune	SEC	
Auto immunité : Ac anti thyroperoxydase, Ac anti thyroglobuline, Facteurs Rhumatoides Protéines : bêta 2 microglobuline Hormones : cortisol, prolactine, sulfate de DHEA, testostérone	Jaune	SEC	
Marqueurs* : CA15.3, CA19.9, CA125 / Sérologie* : Lyme, EBV	Jaune	SEC	1 tube
Hormone : PTH	Jaune / ou / Violet		Tube sec : transmission dans les 6H Tube EDTA : transmission dans la journée

SECTEUR HEMATOLOGIE

NF, plaquettes, VS, réticulocytes, VGM	Violet	EDTA	1 tube (bien rempli si VS)
--	--------	------	----------------------------

Marqueurs* et **Sérologies*** prélever en plus pour l'ensemble des analyses 1 tube jaune

Ordre des tubes : BLEU → JAUNE → VERT → VIOLET → GRIS (Pas de tube de purge y compris avec les Epijet)

SECTEUR IMMUNO HEMATOLOGIE			
groupes sanguins, phénotypes, anticorps irréguliers, COOMBS direct	Violet	EDTA	1 tube
VERIFIER L'IDENTITE A PARTIR DE LA CARTE D'IDENTITE DU PATIENT OU DU PASSEPORT			
SECTEUR COAGULATION			
TP, fibrinogène, D Dimères, TCA, Facteur V	1 Bleu rempli jusqu'au trait	Citrate	TCA : transmis labo < 6H TCA sous HNF : transmis labo < 2H Facteur V : transmis labo < 4 H
AT3, facteurs de coagulation, protéine C et S, recherche ACC	4 Bleus	Citrate	4 tub. remplis jusqu'au trait transmis labo < 4 H
Activité anti Xa (héparinémie)	1 Bleu	Citrate	1 tub. remplis jusqu'au trait transmis labo < 1 H
ANALYSES SPECIALISEES LES PLUS COURANTES			
CDT (Transferrine carboxy déficient), delta 4 androstènedione, fructosamine, 5'NU, IgE totales, phénobarbital (Gardenal), carbamazépine (tégrétol), C3, C4, orosomucoïde Sérologie : syphilis, herpès, Rougeole, VZV, Maladie des griffes du chat, ASD, ASL, Chlamydiae Allergie : phadiatop, trophatop, RAST et/ou allergènes spécifiques, MAST CLA Auto immunité : ACAN, Ac anti mitochondries, Ac anti muscle lisse, Ac Anti-LKM, (réticulum endoplasmique), Ac anti-LC1 (Cytosol Hépatique), Ac anti DNA natif, Ac anti ENA, Ac anti peptides citrullinés, Ac anti transglutaminase, ANCA, Ac anti récepteur de la TSH	Jaune	SEC	1 tube Prevoir plusieurs tubes si plusieurs tests
AMH - Hormone anti-Mullérienne	Jaune	SEC	Joindre les renseignements cliniques et échographiques
charge virale / PCR : hépatite B, hépatite C	2 Jaunes	SEC	2 Tubes transmis labo < 4 H
charge virale / PCR : HIV	Violet	EDTA	1 Tube transmis labo < 4 H
Marqueur : Cross Laps	Jaune	SEC	Prélever le matin , à jeun ,(avant 9h si possible) , à la même heure pour des mesures successives Transmis labo < 4 H
Médicament : ciclosporine, tacrolimus	Violet	EDTA	1 tube
Dépistage de la trisomie 21	2 Jaunes	SEC	2 Tubes transmis labo < 4 H
Joindre impérativement la fiche de renseignements, l'attestation de consultation préalable, le consentement éclairé de la patiente et l'ordonnance			
complément CH50, NSE	Jaune	SEC	1 tube transmis labo < 1 H
thyroglobuline	Jaune	SEC	2 tube transmis labo < 2 H
Cryoglobuline, Vitamine C et DPNI	Prélèvement au laboratoire (Cryoglobuline à jeun)		
magnésium érythrocytaire	Vert	Heparine	1 tube sans gel
folates érythrocytaires	Violet	EDTA	1 tube violet A jeun