

Ordre des tubes : BLEU → JAUNE → VERT → VIOLET → GRIS

SECTEUR CHIMIE			
acide urique, albumine, bilirubine totale et directe, calcium, CPK, créatinine, CRP, fer, ferritine, capacité de fixation de la sidérophiline, GGT, haptoglobine, Ig G, A, M, Iono, LDH, lipase, magnésium, myoglobine, phosphatase alcaline, phosphore, protéines totales, réserve alcaline, transaminases, transferrine, troponine, urée	Vert	Héparine	1 tube
acide lactique, ammoniémie, calcium ionisé	Vert	Héparine	Acheminement immédiat à 4° (1 tube pour secteur chimie)
Bilan lipidique (EAL) : cholestérol, HDL, triglycérides, Apo A et B	Vert	Héparine	1 tube à jeun (1 tube pour secteur chimie)
glucose	gris	fluorure	1 tube à jeun
électrophorèse des protéines et/ou immunofixation	2 Jaunes	SEC	2 tubes
BNP	Violet	EDTA	1 tube
hémoglobine glyquée	Violet	EDTA	1 tube
SECTEUR IMMUNOLOGIE			
Sérologie* : hépatite C, HIV Marqueurs* : PSA totale et libre Protéines : Préalbumine, orosomucoïde, béta 2 microglobuline Hormones : FSH, LH, oestradiol, progestérone Médicaments : lithium	Jaune	SEC	1 tube
Sérologie* : hépatite A, hépatite B (Ag HBs, Ac HBc et HBs), rubéole, toxo., CMV	Jaune	SEC	1 tube
Sérologie* : syphilis, MNI test Auto immunité : facteurs rhumatoïdes (Latex, Waaler Rose)	Jaune	SEC	1 tube
Marqueurs* : CA15.3, CA19.9, CA125, Sérologie* : Lyme et EBV	Jaune	SEC	1 tube
Marqueurs* : AFP, ACE Hormones : prolactine, testostérone, sulfate de DHEA, cortisol	Jaune	SEC	1 tube Cortisol : préciser H de Pvt
Vitamines : folates, vitamine B12 sérique	Jaune	SEC	1 tube A jeun pour analyse folates
Protéine : procalcitonine (PCT)	Vert	Héparine	1 tube
Hormones : βHCG, T3 libre, T4 libre, TSH Vitamine D Médicaments : digoxine, acide valproïque	Vert	Héparine	1 tube (1 tube pour secteur chimie)
Médicaments : carbamazépine (tégrétol), phénobarbital Autoimmunité : C3, C4	Jaune	SEC	1 tube
Auto immunité : Ac anti thyroperoxydase, Ac anti thyroglobuline	Jaune	SEC	1 tube
Médicament : ciclosporine, tacrolimus	Violet	EDTA	1 tube

Marqueurs* et **Sérologies*** prélever en plus pour l'ensemble des analyses 1 tube jaune

Ordre des tubes : BLEU → JAUNE → VERT → VIOLET → GRIS

PTH	Jaune / ou / Violet		Tube sec : transmission dans les 6H Tube EDTA : transmission dans la journée
Cross Laps	Jaune / ou / Violet		A jeun, prélever avant 9H00 Tube sec : transmission dans les 8H Tube EDTA : transmission dans la journée
Hormones : ostéocalcine Sérologie* : Chlamydiae	Jaune	SEC	1 tube
Auto immunité : Ac anti DNA natif, Ac anti ENA Ac anti peptides citrullinés	Jaune	SEC	1 tube
Auto immunité : ACAN, Ac anti mitochondries, Ac anti muscle lisse, Ac Anti-LKM (réticulum endoplasmique), Ac anti-LC1 (Cytosol Hépatique), Sérologie* : Western blot Maladie de Lyme, Mycoplasmes urogénitaux	Jaune	SEC	1 tube
Auto immunité : Ac anti transglutaminase de classe IgA	Jaune	SEC	1 tube
Allergie : phadiatop, trophatop, RAST et/ou allergènes spécifiques, MAST CLA	Jaune	SEC	1 tube
charge virale / PCR : hépatite C	2 Jaunes	SEC	2 tubes
charge virale / PCR : hépatite B, HIV	2 Violets	EDTA	2 tubes

SECTEUR HEMATOLOGIE

NF, plaquettes, VS, réticulocytes, VGM	Violet	EDTA	1 tube (bien rempli si VS)
--	--------	------	-----------------------------------

SECTEUR IMMUNO HEMATOLOGIE

groupes sanguins, phénotypes, anticorps irréguliers, COOMBS direct	Violet	EDTA	1 tube
--	--------	------	--------

**IMPERATIF : NOTER SUR LE TUBE LE NOM, LE PRENOM, LE NOM DE JEUNE FILLE, LA DATE DE NAISSANCE, LE SEXE
TOUTE FAUTE D'ORTHOGRAPHE OU TOUTE INFORMATION MANQUANTE REND LE PRELEVEMENT INUTILISABLE**

SECTEUR COAGULATION

TP, TCK (TCA), fibrinogène, D Dimères,	Bleu	Tube CTAD	1 tube rempli jusqu'au trait
TCA patient sous héparine Activité anti Xa (héparinémie)	Bleu	Tube CTAD	1 tube rempli jusqu'au trait transmis labo < 4 H
AT3, facteurs de coagulation, protéine C et S, recherche ACC, Indice de rosner	4 Bleus	Tube CTAD	4 tub. remplis jusqu'au trait transmis labo < 4 H

ANALYSES SPECIALISEES LES PLUS COURANTES

Ac anti récepteur de la TSH, Ac et Ag HBe, ANCA, CDT (Transferrine carboxy déficient), delta 4 androstènedione, fructosamine, 5'NU, IgE totales Sérologie : herpès, Rougeole, VZV, Mycoplasme, Maladie des griffes du chat, ASD,ASL	Jaune	SEC	1 tube Prevoir plusieurs tubes si plusieurs tests
Dépistage de la trisomie 21	2 Jaunes	SEC	2 Tubes transmis labo < 4 H
Joindre impérativement la fiche de renseignements, l'attestation de consultation préalable, le consentement éclairé de la patiente et l'ordonnance			
complément CH50, NSE	Jaune	SEC	1 tube transmis labo < 1 H
thyroglobuline	Jaune	SEC	2 tube transmis labo < 2 H
magnésium érythrocytaire	Vert	Heparine	1 tube sans gel
folates érythrocytaires	Violet	EDTA	1 tube violet A jeun