

Ordre des tubes : BLEU → JAUNE → VERT → VIOLET → GRIS

## SECTEUR CHIMIE

acide urique, albumine, bilirubine totale et directe, calcium, CPK, créatinine, CRP, fer, ferritine, capacité de fixation de la sidérophiline, GGT, haptoglobine, Ig G, A, M, Iono, LDH, lipase, magnésium, myoglobine, phosphatase alcaline, phosphore, protéines totales, réserve alcaline, transaminases, transferrine, troponine, urée

Vert

Héparine

1 tube

acide lactique, ammoniémie, calcium ionisé

Vert

Héparine

**Acheminement immédiat à 4°**  
(1 tube pour secteur chimie)

Bilan lipidique (EAL) : cholestérol, HDL, triglycérides, Apo A et B

Vert

Héparine

**1 tube à jeun**  
(1 tube pour secteur chimie)

glucose

gris

fluorure

**1 tube à jeun**

électrophorèse des protéines et/ou immunofixation

2 Jaunes

SEC

2 tubes

BNP

Violet

EDTA

1 tube

hémoglobine glyquée

Violet

EDTA

1 tube

## SECTEUR IMMUNOLOGIE

**Sérologie\*** : hépatite C, HIV

**Marqueurs\*** : PSA totale et libre

Protéines : Préalbunine, orosomucoïde, bêta 2 microglobuline

Hormones : FSH, LH, oestradiol, progestérone

Médicaments : lithium

Jaune

SEC

1 tube

**Sérologie\*** : hépatite A, hépatite B (Ag HBs, Ac HBc et HBs), rubéole, toxo., CMV

Jaune

SEC

1 tube

**Sérologie\*** : syphilis, MNI test

Jaune

SEC

1 tube

**Marqueurs\*** : CA15.3, CA19.9, CA125 / **Sérologie\*** : Lyme et EBV

Jaune

SEC

1 tube

**Marqueurs\*** : AFP, ACE

Hormones : prolactine, testostérone, sulfate de DHEA, cortisol

Jaune

SEC

1 tube  
Cortisol : préciser H de Pvt

Hormone : AMH (hormone anti mullerienne)

Vert

Héparine

1 tube

Vitamines : folates, vitamine B12 sérique

Jaune

SEC

1 tube **A jeun pour analyse folates**

Protéine : procalcitonine (PCT)

Vert

Héparine

1 tube

Hormones :  $\beta$ HCG, T3 libre, T4 libre, TSH

Vitamine D

Médicaments : digoxine, acide valproïque

Vert

Héparine

1 tube  
(1 tube pour secteur chimie)

Médicaments : carbamazépine (tégrétol), phénobarbital

Autoimmunité : C3, C4

Jaune

SEC

1 tube

Auto immunité : Ac anti thyroperoxydase, Ac anti thyroglobuline

Jaune

SEC

1 tube

Médicament : ciclosporine, tacrolimus

Violet

EDTA

1 tube

**Marqueurs\*** et **Sérologies\*** prélever en plus pour l'ensemble des analyses 1 tube jaune

**Ordre des tubes : BLEU → JAUNE → VERT → VIOLET → GRIS**

Hormone : PTH	Jaune / ou / Violet		Tube sec : transmission dans les 6H Tube EDTA : transmission dans la journée
Marqueur : Cross Laps	Jaune / ou / Violet		<b>A jeun, prélever avant 9H00</b> Tube sec : transmission dans les 8H Tube EDTA : transmission dans la journée
Hormone : ostéocalcine / <b>Sérologie*</b> : Chlamydiae	Jaune	SEC	1 tube
Auto immunité : Ac anti DNA natif, Ac anti ENA Ac anti peptides citrullinés	Jaune	SEC	1 tube
Auto immunité : ACAN, Ac anti mitochondries, Ac anti muscle lisse, Ac Anti-LKM (réticulum endoplasmique), Ac anti-LC1 (Cytosol Hépatique), Facteurs Rhumatoides <b>Sérologie*</b> : Western blot Maladie de Lyme, Mycoplasmes urogénitaux	Jaune	SEC	1 tube
Auto immunité : Ac anti récepteur de la TSH	Jaune	SEC	1 tube
Auto immunité : Ac anti transglutaminase de classe IgA	Jaune	SEC	1 tube
Allergie : phadiatop, trophatop, RAST et/ou allergènes spécifiques, MAST CLA	Jaune	SEC	1 tube
charge virale / PCR : hepatite B, HIV, hepatite C	2 Violets	EDTA	2 tubes

**SECTEUR HEMATOLOGIE**

NF, plaquettes, VS, réticulocytes, VGM	Violet	EDTA	1 tube <b>(bien rempli si VS)</b>
--	--------	------	-----------------------------------

**SECTEUR IMMUNO HEMATOLOGIE**

groupes sanguins, phénotypes, anticorps irréguliers, COOMBS direct	Violet	EDTA	1 tube
--	--------	------	--------

**VERIFIER L'IDENTITE A PARTIR DE LA CARTE D'IDENTITE DU PATIENT OU DU PASSEPORT  
TOUTE FAUTE D'ORTHOGRAPHE OU TOUTE INFORMATION MANQUANTE REND LE PRELEVEMENT INUTILISABLE**

**SECTEUR COAGULATION**

TP, fibrinogène, D Dimères, TCA, Activité anti Xa (héparinémie),Facteur V	1 Bleu	CTAD	1 tube rempli jusqu'au trait <b>transmis labo &lt; 8H (TCA, Facteur V)</b> <b>transmis labo &lt; 6H (TCA sous Hep, AXA)</b>
AT3, facteurs de coagulation, protéine C et S, recherche ACC	4 Bleus	CTAD	4 tub. remplis jusqu'au trait <b>transmis labo &lt; 4 H</b>

**ANALYSES SPECIALISEES LES PLUS COURANTES**

Ac et Ag HBe, ANCA, CDT (Transferrine carboxy deficient),delta 4 androstènedione, fructosamine, 5'NU, IgE totales Sérologie : herpès, Rougeole, VZV, Mycoplasme, Maladie des griffes du chat, ASD,ASL	Jaune	SEC	1 tube <b>Prevoir plusieurs tubes si plusieurs tests</b>
Dépistage de la trisomie 21	2 Jaunes	SEC	2 Tubes transmis labo < 4 H
Joindre impérativement la fiche de renseignements, l'attestation de consultation préalable, le consentement éclairé de la patiente et l'ordonnance			
complément CH50, NSE	Jaune	SEC	1 tube transmis labo < 1 H
thyroglobuline	Jaune	SEC	2 tube transmis labo < 2 H
magnésium érythrocytaire	Vert	Heparine	1 tube <b>sans gel</b>
folates érythrocytaires	Violet	EDTA	1 tube violet <b>A jeun</b>